

Aspivenin : le geste d'urgence anti-venin

La référence en cas de piqûres ou de morsures vénimeuses.

En cas de piqûre ou morsure venimeuse, utilisable sur toutes les parties du corps sauf sur les paupières, muqueuses, parties génitales et tympans.

Recommandations :

- Lire attentivement la notice.
- Pour une efficacité maximale, à utiliser dans les 3 minutes qui suivent la piqûre ou morsure.
- Respecter les temps d'aspirations indiqués.

Temps d'aspiration indicatif :

- 1 à 3 min : guêpe, abeille, frelon.
- 20 à 30 s : moustique, mouche.
- 2 à 3 min : vive.
- 1 à 2 min : araignée.

Matériel Médical CE

