

FICHE TECHNIQUE

Attelles de Stack - 6 tailles disponibles

Permet l'immobilisation de l'extrémité du doigts et des deux phalanges

L'attelle de Stack s'utilise en cas de traumatisme, luxation, arthrose ou encore lors de fracture.

Son rôle principal est de protéger l'articulation du doigt.

- Attelle d'immobilisation perforée,
- Non invasif
- Immobilisation en extension de la dernière phalange du doigt,
- Se fixe grâce à un sparadrap ou velcro.

Matière : résine acrylique thermoplastique.

Mode d'emploi : Prendre une attelle selon la dimension du doigt à traiter. Chauffer l'attelle à l'aide d'eau chaude. Former l'attelle lorsqu'elle est chaude pour l'adapter parfaitement au doigt. Enfiler l'attelle jusqu'à ce que le bout du doigt touche le fond de l'attelle. Fixer l'attelle au doigt en utilisant [un sparadrap](#) ou [un velcro](#) en enroulant ce dernier sur l'attelle dans sa partie supérieure

6 tailles disponibles (Lo (hauteur doigt) x La (largeur doigt à la base de l'ongle x P (profondeur))

- Ref. ATS001 - **Taille 1** : 51 x 22 x 15 mm
- Ref. ATS002 - **Taille 2** : 53 x 22 x 15 mm
- Ref. ATS003 - **Taille 3** : 58 x 25 x 17 mm
- Ref. ATS004 - **Taille 4** : 61.5 x 25.5 x 17.5 mm
- Ref. ATS005 - **Taille 5** : 57 x 26 x 16.5 mm
- Ref. ATS006 - **Taille 6** : 62 x 33 x 21 mm

Pour choisir la taille, se référer à l'image du schéma.

Stérilisation : Oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma.

Nettoyage : Avec une solution qui n'attaque pas la résine acrylique thermoplastique, au détergent.

Matériel Medical CE.

Précaution d'emploi :

Ce dispositif ne peut être utilisé et installé que par une personne compétente et qualifiée. Vérifier avant utilisation que l'attelle soit en bon état. Ce dispositif est unipersonnel et ne doit pas être utilisé pour une autre personne. Nettoyage possible au détergent ou à l'eau savonneuse



