

Bouteille pilulier de voyage 4 en 1

Utilisable comme gourde pilulier et coupe-écrase comprimé lors de vos déplacements.

Pour boire, stocker, séparer, écraser et couper tout type de comprimés. Sans biphénol A.

Bouteille démontable en 3 parties :

- Couvercle pilulier : pour ranger et séparer les médicaments.
- Récipient transparent : contient jusqu'à 340 ml d'eau.
- Base : fonction coupe et écrase comprimé.

Mode d'emploi :

- Coupe comprimé : ouvrir le couvercle en faisant attention à la lame, placer le comprimé au centre et refermer le couvercle.
- Écrase comprimé : dévisser le coupe comprimé, le retourner, placer les comprimés à l'intérieur, se munir de la base circulaire et la visser pour écraser les comprimés.

Taille de la bouteille : 75 x 75 x 215 mm.

Contenance : 340 ml.

Poids : 257 g.

Composition : bouteille et joint en plastique, lame en acier inoxydable, sangle en silicone.

