



Défibrillateur semi automatique Dsa Saver One

Pour une sécurité d'utilisation avec une garantie de 6 ans sur le défibrillateur et de 5 ans - 300 chocs pour la batterie

Défibrillateur DAE semi automatique, pour une utilisation tous publics, avec mode bilingue, mini écran LCD, et métronome intégré. Mode interactif très facile avec guidage oral et visuel de l'utilisateur lors des étapes successives de la réanimation.

- Fabrication et conception européenne garantie 6 ans.
- Batterie Lithium garantie 300 chocs - 5 ans.
- Mode bilingue français - anglais.
- Utilisation tous publics.
- Avec message vocal s'adaptant à la vitesse du sauveteur.
- Mini écran LCD (5 x 1,5 cm) reprenant simultanément les messages vocaux.
- Séquences de chocs 150 - 200 - 200 joules.
- Chocs 50 joules adaptés aux enfants.
- Mode semi-automatique avec analyse et charge automatique.
- Maintenance automatique par autotests quotidiens, mensuels, semestriels et lors du remplacement de la batterie.
- Lecture des données de base (autotests) stockées dans la mémoire interne du dispositif (1 Gb).
- Lecture complète des données liées à l'intervention (informations principales intervention : date, heure, nombre de chocs, etc) avec le logiciel "Saver View Express" (en option).
- Carte mémoire externe 1 Gb en option, connexion avec port USB (câble en option).

Petit et léger, il est utilisable dans les endroits publics et privés.

- Batterie lithium longue durée garantie 5 ans 300 chocs non rechargeables.
- Électrodes garanties 30 mois avec dispositif d'autotest quotidien.
- Défibrillateur garanti 6 ans.
- Conformes aux Normes EN 60601-2-4 relatives aux règles particulières de sécurité.
- Indice de protection IP 54 (poussière et eau).

Livré complet avec une sacoche de transport :

- 1 pile au lithium
- 1 paire d'électrodes adulte (garanties 30 mois)
- 1 kit de premiers secours et un kit signalétique.

Pour la fixation sur site, il est nécessaire d'utiliser une armoire, vous pouvez vous référer à notre gamme [d'armoire de protection](#) ou à nos [packs défibrillateurs](#).

Dimensions : 265 x 215 x 75 mm

Poids : 1,95 kg

Matériel médical CE de classe IIb

MAINTENANCE DE VOTRE DEA: C'est encore plus simple avec Robé Médical !

Votre DAE est un dispositif de classe III, à ce titre il est obligatoire d'effectuer une maintenance.

L'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) a édité les recommandations vous permettant d'être en conformité avec la loi ([voir recommandations complètes ANSM](#)).

Les recommandations principales sont les suivantes :

1. Former les personnels à l'utilisation du DAE
2. Désigner une personne responsable du suivi du DAE
3. Mettre en place un registre de maintenance
4. Enregistrer le DAE auprès du fabricant et des services de secours
5. Traçer le lieu d'implantation du DAE
6. Mettre le DAE dans un lieu visible et facilement accessible
7. Ne pas exposer le DAE à la chaleur (+40°) ou au froid (-0°)
8. Vérifier régulièrement l'état extérieur du DAE
9. Vérifier régulièrement le témoin de marche conformément à la notice d'utilisation ainsi que les dates de péremption de la batterie et des électrodes
10. Déclarer auprès de l'ANSM tout dysfonctionnement observé sur le DAE en cours d'utilisation pouvant avoir ou ayant eu une incidence sur l'état de santé de la personne secourue, d'un utilisateur ou d'un tiers.

Robé Médical vous permet de répondre à ces obligations de conformité en vous proposant 2 options:

- La fourniture d'un registre de maintenance complet répondant à toutes ces obligations.
- La fourniture de panneaux de signalisation.
- Pour une garantie optimale de conformité une maintenance supplémentaire externalisée non obligatoire par un SAV certifié ISO 13485 avec une vérification physique de votre appareil tous les 2 ans sur 20 points de contrôle précis.

Ce contrat non obligatoire peut être pris séparément et ultérieurement à l'achat de votre DEA. Merci de contacter [notre service Maintenance et SAV](mailto:notre.service.Maintenance.et.SAV) par mail j.vincent@robe-medical.com