



Détergent désinfectant Bidon 5L Medfill - Stericid

Pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux.

Caractéristiques :

Nettoyage et désinfectant des :

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, m...

Formule :

- Sans parfum
- Actif : Chlorure de Didécyl diméthylammonium

Utilisation :

- Répartir généreusement le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant sur toute la surface.
- Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m²)
- Laisser agir 5 min.
- Ne pas rincer.

Produit destiné au professionnels.

Précautions d'emploi :

Aucun pictogramme de danger

En cas d'incident, contacter le CAP le plus proche.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéricide : EN1276*, EN13727**, EN13697** en 5 min.
- Levuricide : EN1650*, EN13624**, EN13697** en 5 min.

Actif sur virus : EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus
EN16777** sur Vaccinia, Norovirus, Adenovirus en 5 min.

- *3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton.
- **3g/L albumine bovine.

Fabrication Française.