

Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes

Pour la désinfection rapide du matériel médical. Actif sur Coronavirus.

Les lingettes Quick Wipes Anios imprégnées à large spectre garantissent une action de désinfection rapide du matériel médical non immergeable (au bout de 30 secondes). Senteur agréable et original Thé citron.

Activité virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476 sur vaccinia virus.

- Prête à l'emploi,
- Usage unique,
- Sans rinçage,
- Sans aldéhyde, sans colorant.

A utiliser sur du matériel médical préalablement nettoyé et résistant à l'alcool (sondes échographiques, stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres,...).

Convient pour le nettoyage et la désinfection des insufflateurs manuels réutilisables de type BAVU: AMBU, ROBE MEDICAL, DRÄGER.

Propriétés microbiologiques:

- Bactéricide en 30 secondes: EN140, EN13727, EN14561, EN13697, SARM selon EN14561.
- Tuberculocide en 30 secondes: EN14348, EN14563.
- Mycobactericide en 5 minutes: EN14348, EN14563.
- Levuricide en 30 secondes: EN1275, EN13624, EN14562, EN13697.
- Fongicide en 5 minutes: EN1275, EN13624, EN14562, EN13697.
- Trichophyton en 30 secondes: EN14562.
- Actif sur les virus en 30 secondes: Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H1N1).
- Actif sur les virus en 5 minutes: Calicivirus Felin (MNV selon EN14476).

Dimensions de la lingette : 130 x 200 mm.

Boîtes distributrices de 120 lingettes.

Usage professionnel.

Matériel médical CE, Classe IIb.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- H228 Matière solide inflammable

