



Lingettes nettoyantes désinfectantes écoresponsables Medwipes

Pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux.

Lingettes permettant le Nettoyage et la désinfection des surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...) et des surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...)

Lingettes en fibres biodégradables. Réduit l'impact sur l'environnement par rapport à une lingette classique.
Emballage 100% recyclable.

Composition :

- Sans parfum
- Actif : Chlorure de Didécyl diméthylammonium
- Bactéricide, levuricide et virucide (Covid-19)

Utilisation :

- A usage unique.
- Soulever le couvercle et retirer l'étiquette autocollante.
- Sortir une lingette du paquet.
- Passer 3 lingettes par m² de surfaces à nettoyer et désinfecter.
- Laisser agir 5 minutes
- Ne pas rincer.

Précautions d'emploi :

- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Aucun pictogramme de danger.
- En cas d'incident, contacter le CAP le plus proche.
- Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois
- Consignes de tri : Emballage complet à mettre dans la poubelle de tri (sachet, capot, étiquette)

Produit destiné aux professionnels.

Conditionnement :

- Pack de 100 lingettes épaisses 180x200 mm

Fabrication Française.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN1276*, EN13727**, EN13697**, EN16615** en 5 min.

Levuricide : EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN16615** en 5 min.

Efficace contre les virus : EN14476**

Efficace contre la vaccine, l'herpès, le PRV, le BVDV, le coronavirus, le VIH, le rotavirus, l'adénovirus et le norovirus en 5 minutes.

Actif sur EN16777** Vaccinia, norovirus, adénovirus en 5 min.

*3g/L d'albumine bovine + 3mL/L de globules rouges de mouton. **3g/L d'albumine bovine.

Produit biocide TP2 et TP4.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com