

Planche incurvée avec disque de transfert Beasy Glyder à 360° - 80 x 26 cm - Assis-assis

Idéale pour faciliter le transfert des personnes plus lourdes ou fragiles grâce au rail et disque de transfert

Équipée d'un disque de transfert rotatif à 360° et d'un rail, cette planche permet au personnel médical de pouvoir déplacer sans effort ni friction des patients plus lourds ou plus fragiles que la moyenne.

Fabriquée en polymère DuPont offrant durabilité et solidité, cette planche permet de résister jusqu'à 180 kg, permettant de prendre en charge la grande majorité des patients.

Testé à une charge maximale, le disque continue de tourner sans difficulté et se déplace sans à-coups permettant un transfert toujours aussi simple et sûr.

Cette planche est facilement lavable et désinfectable avec des produits ménagers courants ou tout autre spray désinfectant non abrasif.

Si besoin, le disque de transfert peut être facilement retiré de la planche.

- Disque de transfert rotatif à 360° et rail pour un transfert sans effort
- Planche incurvée pour faciliter le transfert entre les éventuels obstacles
- Fabriquée en polymère DuPont offrant durabilité et solidité
- Légère, facile à transporter et à ranger
- Facilement lavable (produit ménager, spray, lingettes)

- Dimensions (Longueur x Largeur): 80 x 26 cm

- Poids: 2,3 kg

- Résistance: 180 kg

- Matériau: Polyamère DuPont

Conseils d'utilisation:

1. Assurer un transfert horizontal (ou le plus horizontal possible)
2. Placer la planche pour le transfert entre le point A et B
3. Positionner le disque de transfert sous la cuisse du patient
4. S'assurer que le patient est bien positionné
5. Effectuer le transfert en maintenant le patient (utilisation d'une ceinture de transfert possible)

Dispositif médical CE conforme MDR.

