

FICHE TECHNIQUE

Pressothérapie - Bottes de compression pour jambes (mollet, cheville et pieds) - ZeniXx

Pour un massage revigorant et une amélioration de la circulation sanguine. 2 modes de massage, 3 niveaux d'intensité de pression

Ces bottes de pressothérapie fonctionnent en se gonflant et en comprimant les mollets et les pieds.

Les muscles ont l'impression d'être massés par les mains.

- 2 modes de massages
- 3 niveaux d'intensité
- Non chauffant
- Massage des mollets et des pieds
- Fonction d'arrêt automatique de 20 minutes
- Télécommande de contrôle
- Branchements simples

Compris avec les bottes :

- 2 x bottes de massage
- 1 x télécommande de contrôle
- 1 x adaptateur secteur/ DC12V1A
- 1 x Mode d'emploi

Utilisation :

- S'assurer que chaque botte soit sur le bon pied et correctement.
 - Vérifier et ajuster la position et le serrage, sans trop serrer.
 - Prendre la télécommande et appuyer sur le bouton d'alimentation pour lancer l'appareil.
- Il commencera par le mode 1 et la force 1 (la plus basse) par défaut.
- Appuyer sur le bouton « Mode » pour changer et profiter des différents modes de massage.
 - Appuyer sur le bouton « Pression d'air » pour sélectionner l'intensité.
 - Appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Dimensions : voir photo

