



### Spray détergent désinfectant Medspray - 750 ml

Adapté à usage régulier en milieu médical, collectivité ou les lieux accueillant du public.

Détergent désinfectant surfaces et dispositifs médicaux pour le nettoyage des surfaces dures non poreuses en milieu médical, dans la collectivités ou lieux accueillant du public et des surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques..)

**Formule :**

- Sans parfum
- Actif : Chlorure de Didécylidiméthylammonium (n° CAS 7173-51-5 : 0.29%).

**Propriétés microbiologiques :**

A 20°C:

- Bactéricide EEN1276\*, EN13727\*\*, EN13697\*\* EN 5 MN
- Levuricide EN1650\*, EN13624\*\*, EN13697\*\* en 5 min.
- Actif sur Virus EN14476\*\* sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus. EN16777\*\* sur Vaccina, Norovirus, Adenovirus

\*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton, \*\* 3g/L albumine bovine

**Mode d'emploi :**

- Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface.
- Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m<sup>2</sup> soit 22 pulvérisations).
- Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

Fabrication Française.

Produit destiné aux professionnels.