

FICHE TECHNIQUE

Test de grossesse Biosynex Simply fiable 99%

Détection de l'hormone Hcg en 3 minutes

Pour une information de votre état de grossesse dès le lendemain de la date présumée de vos menstruations.



Utilisation :

- Positionner l'embout du test de grossesse sous votre jet d'urine ou le tremper au moins 15 secondes dans un échantillon d'urine recueilli dans un récipient propre.
- Replacer le capuchon sur l'embout, poser le test.
- Le résultat doit être lu après 3 minutes
- Lecture du résultat : 2 lignes enceinte, 1 ligne pas enceinte.
- Ne pas lire les résultats au-delà de 10 minutes.
- Utiliser de préférence avec la première urine du matin.

Dimension boîte : 14x2 cm.

Conserver au sec et à l'abri de la lumière, entre 2° et 30°C.

Usage unique.

Conditionné dans pochette en aluminium.

Matériel médical CE.

Un diagnostic confirmé de grossesse ne doit être posé que par un médecin après évaluation des résultats cliniques et de laboratoire