

# Coalgan

## 70 ans

### d'efficacité hémostatique

y compris chez les patients à risque de saignement  
(sous AINS, aspirine, clopidogrel, héparines, anti-vitamine K)

Remboursé  
sous nom  
de marque

Peut être prescrit  
par les IDE<sup>2</sup>



**Arrêt rapide  
du saignement  
sans risque de  
ressaignement au retrait**

**Utilisation adaptée  
aux enfants,  
femmes enceintes  
et personnes âgées**

Mèche de 4 cm (5/boîte)  
Remboursé LPP : 1314953  
ACL : 3401073757667



1 - HAS (Haute Autorité de Santé). Bon Usage des technologies médicales 2011;  
Les pansements : indications et utilisations recommandées  
2 - JO du 30 Mars 2012

COALGAN est destiné à l'hémostase et à la cicatrisation.  
Dispositif Médical (DM) de classe IIb, CE 0459.  
COALGAN mèche est remboursée LPP sous nom de  
marque avec un prix limite de vente pour les indications :  
épistaxis et autres saignements cutanés et muqueux chez les patients  
présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis.  
Toujours lire la notice avant utilisation.

**COALGAN est développé et fabriqué en France par BROTHIER.**

Siège social : 41 rue de Neuilly, 92000 Nanterre.

**COALGAN est distribué par ALLOGA France. Tél : 0241 337333.**

COALGAN® est une marque déposée par BROTHIER.

SERVICE CLIENTS

Info@brothier.com

0 800 355 153

Service & support  
gratuits



LABORATOIRES

**BROTHIER**

Naturellement Coalgan

www.brothier.com



LABORATOIRES

**BROTHIER**

Naturellement Coalgan

MTPI19COA09A - Mai 2019 - Document destiné exclusivement aux professionnels de santé.

# POUR VOS PATIENTS QUI SAIGNENT DU NEZ...

# Coalgan®

naturellement



Seul produit  
recommandé  
par la HAS chez  
les patients avec  
trouble de  
l'hémostase<sup>1</sup>

ORIGINE  
100 %

VÉGÉTALE



Remboursé LPP  
sous nom de marque

### PRÉPARATION



**1** Pencher la tête en avant pour ne pas avaler de sang  
Se moucher pour évacuer les caillots qui entretiennent le saignement\*



**2** Ouvrir le sachet de **Coalgan** en suivant les pointillés



**3** Pour faciliter son introduction, humidifier **Coalgan** avec une solution de chlorure de sodium (NaCl) à 0,9%



**4** Torsader **Coalgan** pour obtenir une mèche compacte

### UTILISATION



**5** Introduire **Coalgan** dans la narine



**6** Pincer les narines pendant 10 minutes\* et respirer par la bouche



**7** Retirer **Coalgan** après 30 minutes



Pour un bon usage en vidéo, flasher ce QR code

\* Trung T. Truong Tan, Tankéré F. Épistaxis : conduite à tenir  
**Encyclopédie Médico-Chirurgicale** (Elsevier Masson SAS, Paris),  
Traité de Médecine Akos, 6-0450, 2010



Les efforts violents peuvent provoquer de nouveaux saignements

Un saignement persistant nécessite un avis médical

