

robemed +

ABAISSÉ-LANGUE EN BOIS

INSTRUCTIONS

Références :

ALE100, Abaisse-langue en bois enfant

ALB100, Abaisse-langue en bois adulte

Utilisation :

Utilisez un abaisse-langue en l'insérant dans la bouche du patient. Exercez une légère pression sur la langue. Après usage, jetez-le dans un conteneur réservé aux déchets médicaux.

Précautions d'emploi :

À utiliser en usage unique par personne, veillez à utiliser l'abaisse-langue avec précaution afin de ne pas causer de blessures au patient (enfoncement excessif ou pression excessif).

Ne pas utiliser si l'abaisse-langue est endommagé.

Usage professionnel exclusif.

Attention : Les abaisse-langues enfant ne sont pas adaptés aux nourrissons.

Matériel médical CE de classe I conforme à la MDR.



Importateur et service clients :

ROBE MEDICAL
26 rue des poncées
88200 ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT

Représentant UE :

CMC Medical Devices and Drugs S.L
C/ Horacio Lengo N°18, CP 29006
MALAGA SPAIN