

Bottes de pressothérapie
Modèle : S9002/PRS902
Mode d'emploi



Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement la notice avant de l'utiliser et conservez-la bien pour référence.

Sommaire

Mise en garde de sécurité.....	2
Précautions	2
Caractéristiques.....	3
Dépannage.....	3
Nom des composants.....	4
Utilisation.....	5
Entretien.....	6
Contenu du paquet.....	6

Mise en garde de sécurité

Attention : Les personnes présentant les conditions suivantes ou les personnes qui reçoivent un traitement médical doivent consulter le médecin avant d'utiliser le produit:

- 1) Utilisation d'un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux sensibles aux interférences électriques
- 2) Souffrant de tumeurs malignes;
- 3) Souffrant de maladies cardiaques;
- 4) Avoir un dysfonctionnement grave de la neuropathie périphérique ou une perturbation sensorielle causée par le diabète;
- 5) Présentant des traumatismes sur le corps
- 6) Gardez-le hors de la portée des nourrissons, des enfants et des personnes sans la possibilité de l'utiliser indépendamment.
- 7) N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui d'origine.
- 8) Ne pas rayer, endommager, plier, tirer ou tordre excessivement le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur. Sinon, il peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- 9) Il n'est pas autorisé à utiliser lorsque l'adaptateur secteur dysfonctionne ou que la fiche est desserrée.
- 10) Ne branchez pas ou ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- 11) Ne pas laisser la manette de contrôle sous une couverture ou en contact avec une source de chaleur.
- 12) Il est interdit de remodeler, démonter ou réparer son produit sans autorisation.

Précautions

- 1) Arrêtez de l'utiliser immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Ne l'utilisez plus avant de consulter le médecin.
- 2) Ne l'utilisez pas dans la salle de bain, à haute température et dans d'autres endroits humides.
- 3) Débranchez l'adaptateur secteur de la prise avant de le nettoyer et de l'entretenir.
- 4) Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 5) Ne vous promenez pas lorsque vous utilisez ce produit ou portez les bottes.
- 6) Évitez la lumière directe du soleil.
- 7) Ne placez pas de choses lourdes dessus.
- 8) Retirez les fiches de l'adaptateur secteur et les tuyaux d'air du bas du contrôleur si vous n'utilisez pas ce produit.
- 9) Enlevez les bottes, pliez-les dans le sac de rangement ou la boîte si vous n'utilisez pas ce produit.


Caractéristiques

Modèle	S9002
Nom	Bottes de pressothérapie
AC/DC adaptateur	AC entrée: 100~240 Volts, AC 50/60Hz, DC sortie: 12V 1A
Puissance nominale	12W
Minuterie	15 minutes



Dépannage

Problèmes	Causes et solutions
Ne fonctionne pas et le voyant lumineux est éteint	Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien connecté et appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur
Ne fonctionne pas, mais le voyant lumineux est allumé	Il ne fonctionne que lorsque deux tuyaux d'air sont connectés au contrôleur. Veuillez vérifier si les tuyaux d'air sont insérés correctement (attention à la marque « R » et « L »)
Interruption soudaine du fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none">- L'adaptateur secteur ou les tuyaux d'air tombent;- L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes;- Vérifiez si les deux tuyaux d'air sont correctement branchés sur le contrôleur.
Massage trop léger ou trop fort	<ul style="list-style-type: none">- Il y a trois niveaux de massage à choisir- Vous pouvez ajuster le serrage de la sangle pour adapter la force- Éteignez le produit si vous ne pouvez pas supporter la force.
Le contrôleur chauffe.	Il est normal que le contrôleur chauffe après une longue utilisation. Nous vous suggérons de l'éteindre pendant 10 minutes.

Nom des composants

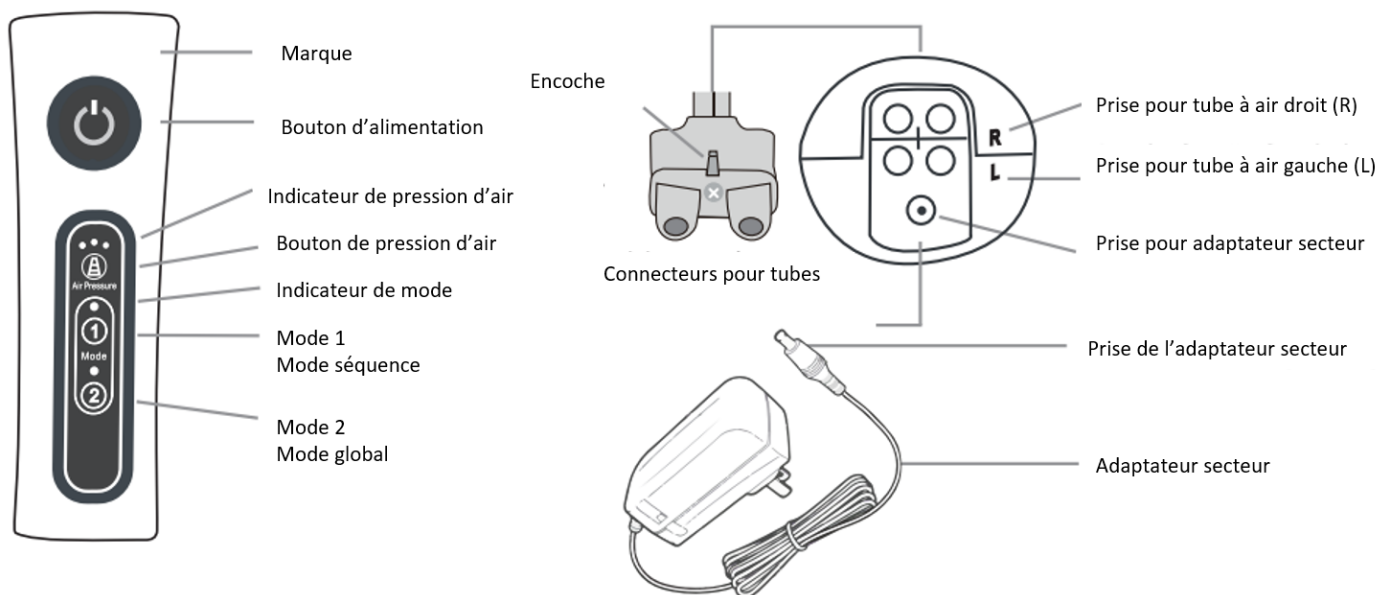


SCHEMA DE LA TELECOMMANDE DE CONTROLE

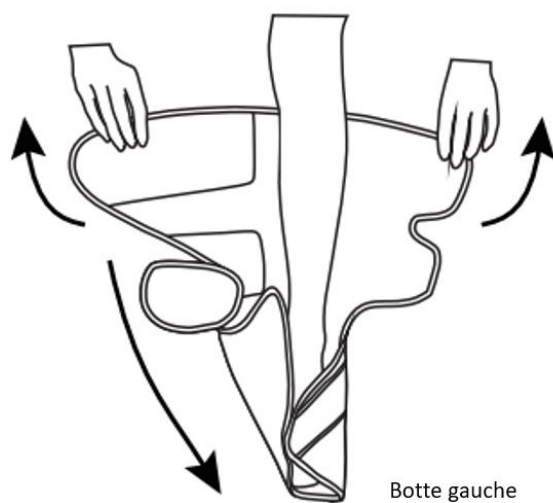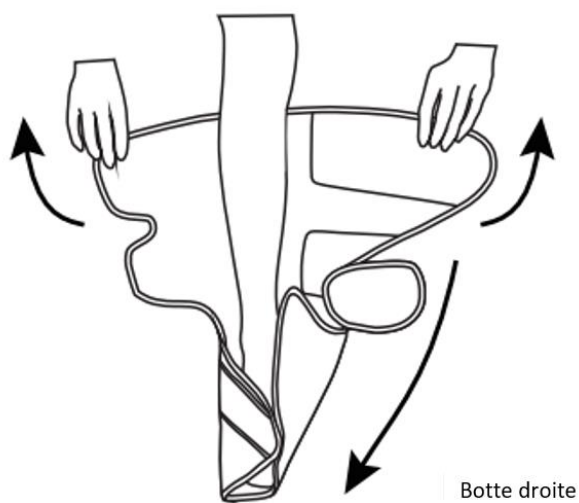


Utilisation

Attention: Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité avant d'utiliser le produit. Pour une meilleure efficacité, veuillez porter les bottes correctement.

- 1) Assurez-vous de chaque botte sur le bon pied et correctement (se référer aux étiquettes).

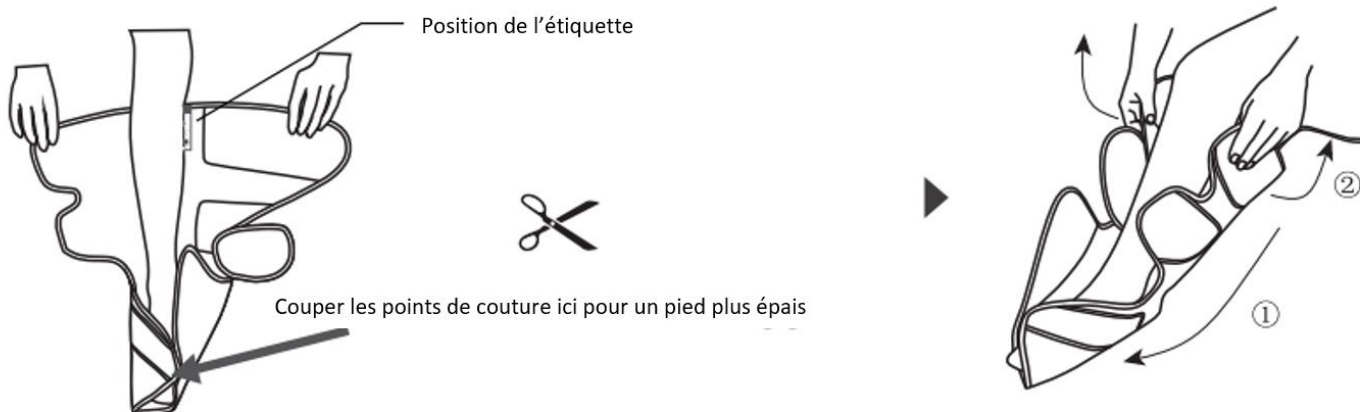

- 2) Vérifiez et ajustez la position et le serrage comme ci-dessous, sans trop serrer. Utilisez les extensions pour les mollets plus volumineux.

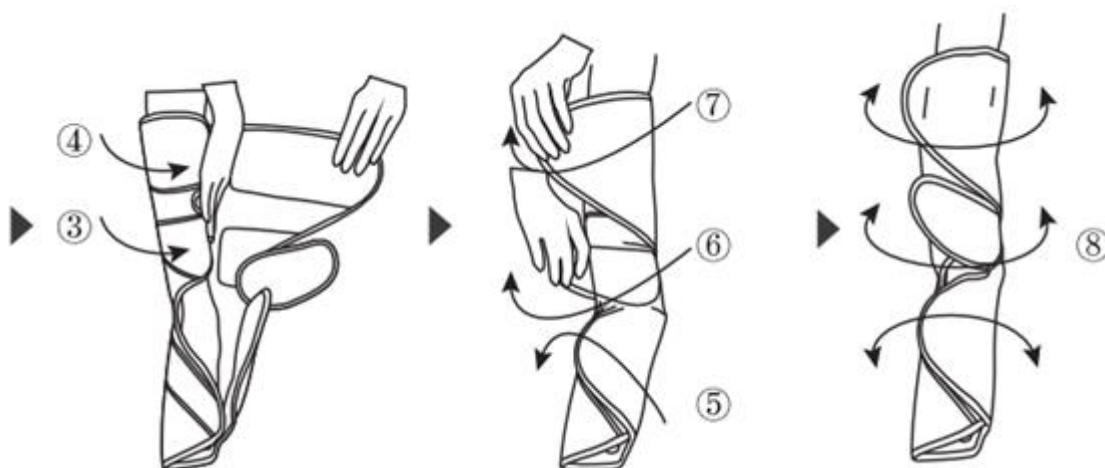

- 3) Branchez l'adaptateur secteur dans le contrôleur (télécommande) et la prise secteur.



- 4) Insérez la prise des deux tuyaux d'air dans le contrôleur correctement et complètement.



Assurez vous que l'encoche soit alignée



Prise R pour le tube droit « R »
Prise L pour le tube gauche « L »

- 5) Prenez la télécommande (contrôleur) et appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil.
 - Il commencera par le mode 1 et la force 1 (la plus basse) par défaut.
 - Il s'éteindra après 15 minutes (vous pouvez le redémarrer manuellement).
- 6) Appuyez sur le bouton « Mode » pour changer et profiter des différents modes de massage.
- 7) Appuyez sur le bouton « Pression d'air » pour sélectionner l'intensité.
 - Trois niveaux de pression au choix. Nous vous suggérons d'utiliser le niveau le plus bas au début.
 - Vous pouvez modifier le serrage des bottes ajuster la force à votre guise.
- 8) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Attention : Nous suggérons d'utiliser l'appareil par session de 15 minutes. Après 15 minutes, l'appareil va s'éteindre automatiquement, mais vous pourrez le rallumer manuellement.

Entretien

Assurez-vous de couper l'alimentation lorsque vous nettoyez la machine.

- 1) Si l'appareil est sale, veuillez essuyer le contrôleur, les bottes et les tuyaux avec un chiffon doux humidifié par une solution de savon.
- 2) N'utilisez pas d'essence, d'alcool, de diluant et d'autres liquides irritants pour essuyer la machine car cela causerait un dysfonctionnement ou pourrait endommager ou décolorer les composants.
- 3) Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
- 4) Des cure-dents peuvent être utilisés pour enlever les poils ou les copeaux attachés sur les velcros.

Contenu du paquet

- 2 x bottes de massage
- 1 x télécommande de contrôle
- 1 x adaptateur secteur/ DC12V1A
- 1 x Mode d'emploi