

# Pansement Hydrocolloïde RenoCare

USAGE UNIQUE  
STERILISE PAR IRRADIATION GAMMA  
STERILISATION GARANTIE PAR UN EMBALLAGE UNITAIRE  
NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE UNITAIRE EST ENDOMMAGE OU OUVERT

## Descriptif

Les pansements hydrocolloïdes RenoCare extra minces sont composés de deux couches, une couche hydrocolloïde absorbante adhésive et une couche de polyuréthane qui laisse respirer la peau. La couche hydrocolloïde absorbe rapidement l'exsudat de la plaie pour ensuite former un gel cohésif. Le film en polyuréthane assure une barrière de protection au liquide tout en étant perméable à la vapeur d'eau. Ces caractéristiques garantissent un milieu humide favorable à la cicatrisation en aidant à la détersion. Les pansements hydrocolloïdes RenoCare vous garantissent une efficacité jusqu'à 7 jours.

Par rapport aux autres hydrocolloïdes classiques RenoCare dispose d'une capacité de rétention supérieure dans le temps.

## Indications

RenoCare hydrocolloïde est essentiellement indiqué pour les plaies légèrement et moyennement exsudatives telles que:





- les ulcérations dermiques
- la prévention des escarres
- les plaies chirurgicales post-opératoires
- les brûlures du 1er et 2ème degré
- les abrasions
- les lacérations

Il est également recommandé pour un usage préventif et fin de cicatrisation.

Peut être utilisé comme pansement secondaire avec un pansement primaire absorbant tel que les pansements RenoCare hydrocellulaire.

### Mode d'application

- 1) Nettoyer soigneusement la blessure avec de l'eau ou du sérum physiologique
- 2) Sécher doucement la peau environnante et vous assurer qu'il ne reste aucun résidu
- 3) Choisir la taille et la forme la plus appropriée. Le pansement doit être d'environ de 1,5 à 2 cm plus gros que la blessure.
- 4) Retirer le pansement de son emballage unitaire, appliquer la plus grande partie adhésive en la centrant sur la plaie. Ne pas étirer. Éviter de toucher la surface adhésive pour réduire au minimum le risque de contamination.
- 5) Retirer la plus petite partie du papier protecteur et l'appliquer directement sur la plaie. Assurez vous que le pansement adhère correctement. L'adhérence s'améliorera avec le réchauffement naturel de la peau. En cas de nécessité, vous pouvez utiliser un bandage médical pour optimiser le maintien du pansement hydrocolloïde RenoCare.

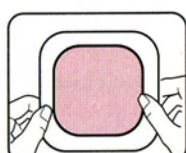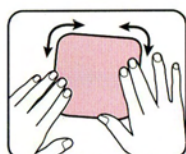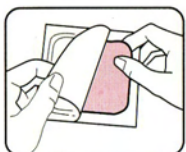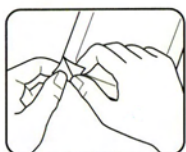

STERILE R



## Fréquence de changement

La fréquence de changement se fera en fonction de l'état de la plaie et de la quantité de l'exsudat produit. Il est conseillé de laisser le pansement hydrocolloïde le plus longtemps possible sur une période n'excédant pas 7 jours. En cas de fuite, le pansement devra être changé immédiatement.

## Retrait du pansement

Pour enlever le pansement appuyer sur la peau avec une main et soulever délicatement un bord du pansement avec l'autre main. Nettoyer la blessure si nécessaire

## Conditions de stockage

Conserver à température ambiante. Ne pas réfrigérer, ni exposer à une forte humidité.


## Précautions

La pansement hydrocolloïde RenoCare extra mince doit être utilisé sous les conseils d'une personne des services médicaux. L'utilisation inappropriée du pansement hydrocolloïde, particulièrement sur les personnes ayant une peau fragile peut occasionner des lésions cutanées. Seul un médecin est habilité à traiter une blessure présentant des signes d'infection cliniques avant une prise en charge par les pansement Renocare. Les ulcères principalement causés par l'insuffisance artérielle doivent être surveillés régulièrement par un médecin.

## Contre indications

- brûlures du troisième degré
- plaies infectées cliniquement et en particulier avec germes anaérobies.
- plaies avec un très grand risque d'infection (type ulcère diabétique)
- patients avec des allergies connues aux pansements hydrocolloïdes.

Capacité de rétention

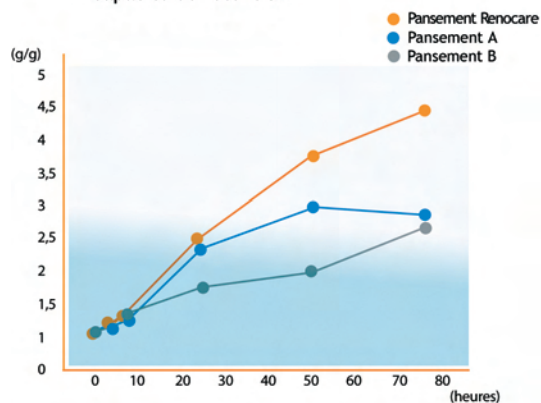

## Dimensions disponibles

10x10cm boîte de 10 unités

15x15cm boîte de 5 unités

20x20cm boîte de 5 unités